

ІНСТРУКЦІЯ
з використання медичного виробу

НАРІВЕНТ, спрей назальний протинабряковий

Показання до застосування:

НАРІВЕНТ – медичний виріб з осмотичною дією, протинабряковим та флоголітичним ефектом.

НАРІВЕНТ показаний для:

- зняття назальної обструкції, що викликана гіпертрофією носових раковин та специфічним (алергічним) або неспецифічним вазомоторним ринітом,
- лікування набряку, пов'язаного з гострими та хронічними риносинуситами та аденоїдами,
- лікування та профілактики післяопераційного рецидиву носових поліпів,
- до- та після операційного лікування патологій носа та приносових пазух.

Склад:

Манітол, гліцерин, дикалію гліцирризинат, сополімер PEG/PPG, EDTA динатрієва сіль, N-гідроксиметилгліцинат, полісорбат 20, калію сорбат, натрію гідроксид, вода очищена, натуральні ароматизатори.

Спосіб застосування:

Зніміть захисний ковпачок. Покладіть великий палець на основу пляшки, вказівним та середнім пальцем натисніть на клапани дозатора і потім відпустіть їх.

Операцію слід повторити до появи спрею.

Злегка нахиліть голову вперед та вприскуйте спрей в ніздрю, не вдихаючи його під час вприскування.

При проведенні дохірургічної терапії медичний виріб призначають пацієнту лише за відсутності гіперчутливості чи непереносимості продукту.

Дорослим та дітям рекомендовано по 2 вприскування в кожную ніздрю 2 рази на день, або за призначенням лікаря.

Побічні ефекти:

Немає даних про побічні ефекти, пов'язані з використанням медичного виробу.

Застереження:

- Продукт може викликати тимчасове легке відчуття носового свербіння і легкого чхання під час першого застосування.
- Специфічний механізм дії медичного виробу НАРІВЕНТ спрей може викликати тимчасову перехідну осмотичну ринорею після його застосування.
- У випадку застосування на доопераційному етапі слід встановити відсутність у пацієнта гіперчутливості чи непереносимості до медичного виробу.
- Не використовувати при наявності гіперчутливості до будь-якого компонента медичного виробу.
- У випадку появи побічних реакцій, використання медичного виробу слід припинити і звернутися до лікаря.
- Не допускати потрапляння в очі.
- Слід щільно закривати контейнер після його застосування.
- Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

- Тримати подалі від джерел тепла, а також в недоступних для дітей місці.
 - Медичний виріб призначений для індивідуального використання.
 - Не ковтати.
 - Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище (з метою уникнення забруднення довкілля).
 - Зберігати при температурі не вище + 30°C.
- Дата останнього перегляду. 14.11.2018

Уповноважений представник: ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Виробник. DMG Italia srl. В'ю Лаурентія, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.
www.dmgit.com.