

Офтальгерд^{Oftalgerd}

краплі очні

Без консервантів

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з даною інструкцією.

1. Що таке Офтальгерд, краплі очні, і для чого їх використовують.

Офтальгерд, краплі очні, є медичним виробом, що застосовується при дисфункції слізної плівки («синдромі сухого ока») для усунення таких симптомів як подразнення, зуд, сльозотеча, відчуття стороннього тіла, відчуття втоми очей і т.д., що мають зворотний характер або виникають в результаті хронічних захворювань.

Офтальгерд, краплі очні завдяки синергічній дії гіалуронової кислоти, альгінату магнію та екстракту *Camellia sinensis* (зелений чай) зволожує та захищає поверхню ока від зовнішніх факторів (таких як ультрафіолетові промені, вітер, пил, смог, контактні лінзи) та ендогенних речовин, таких як протеолітичні ферменти (пепсин), які пов'язані з гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою. Технологія OSD (офтальмологічний дозатор нажимного типу) забезпечує інноваційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів.

2. Що потрібно знати перед використанням медичного виробу Офтальгерд, краплі очні.

Не використовуйте Офтальгерд, краплі очні, якщо у вас алергія або у випадку відомої гіперчутливості до будь-якого компонента медичного виробу (див. розділ 6).

3. Як використовувати Офтальгерд, краплі очні.

- Немає необхідності видаляти контактні лінзи перед використанням Офтальгерд, краплі очні.
- Перед використанням медичного виробу слід помити руки.
- Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на день або згідно рекомендацій лікаря.
- Переконайтеся, що крапельниця не контактує з поверхнею ока.

4. Застереження.

- У разі виникнення побічних реакцій слід припинити застосування медичного виробу і звернутися до лікаря.

- Перед використанням медичного виробу необхідно переконаватися, що контейнер не пошкоджений.
- Перед застосуванням у дітей слід проконсультуватися з лікарем.
- Не використовуйте цей виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Термін придатності вказано щодо запечатаного продукту за умови належного зберігання.
- Для закапування в очі, не ковтати.

5. Як зберігати Офтальгерд, краплі очні.

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не застосовувати більше, ніж 90 днів з моменту відкриття контейнера.
- Після використання щільно закривати контейнер.
- Зберігати при кімнатній температурі не вище +30 °С, подалі від джерел тепла.
- Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище.

6. Додаткова інформація.

Склад: натрієва сіль гіалуронової кислоти, альгінат магнію, гліцерин, екстракт *Camellia sinensis* (зелений чай), буферний розчин pH 7,6.

Упаковка. Контейнер 10 мл з дозатором OSD.

Виробник. DMG Italia srl. Via Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.
www.dmgit.com

Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

