

ОфтасСіале^{Oftassiale}

Краплі очні для захисту рогівки

Без консервантів

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з даною інструкцією.

1. Що таке Офтассіале, краплі очні, і для чого їх використовують.

Різноманітні травми механічного, хімічного чи фізичного характеру можуть пошкоджувати цілісність поверхні рогівки. Епітелій рогівки містить багато нервових закінчень, які забезпечують підтримання морфофункціональної цілісності. Офтассіале, краплі очні, містить гіалуронову кислоту, гліцерилфосфорилхолін і D-пантенол, які сприяють реепітелізації та відновленню нервових закінчень рогівки.

Офтассіале, краплі очні збільшують об'єм слізної плівки та сприяють її стабілізації. Комплекс вітамінів (вітамін B₁₂ і вітамін B₆), що також міститься в розчині, підсилює захисну властивість поверхні ока, обмежуючи негативний вплив зовнішніх факторів та хірургічних втручань.

Офтассіале, краплі очні є медичним виробом, призначеним для зволоження, захисту рогівки, а також для зменшення дискомфорту в очах, больових симптомів, спричинених відчуттям стороннього тіла, зовнішніми факторами, хірургічними операціями та травмами, що піддаються місцевому лікуванню.

Офтассіале, краплі очні сприяють процесам реепітелізації рогівки та відновленню нервових закінчень.

Технологія OSD (офтальмологічний дозатор нажимного типу) забезпечує інноваційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів.

2. Що потрібно знати перед використанням медичного виробу Офтассіале, краплі очні.

Не використовуйте Офтассіале, краплі очні, якщо у вас алергія або у випадку відомої гіперчутливості до будь-якого компонента медичного виробу (див. розділ 6).

3. Як використовувати Офтассіале, краплі очні.

- Немає необхідності видаляти контактні лінзи перед застосуванням Офтассіале, крапель очних.
- Перед використанням медичного виробу слід помити руки.
- Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на день або згідно рекомендацій лікаря.
- Переконайтеся, що крапельниця не контактує з поверхнею ока.

4. Застереження.

- У разі виникнення побічних реакцій слід припинити застосування медичного виробу і звернутися до лікаря.
- Перед використанням медичного виробу необхідно переконаватися, що контейнер не пошкоджений.
- Не використовуйте цей виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Термін придатності вказано щодо запечатаного продукту за умови належного зберігання.
- Для закапування в очі, не ковтати.

5. Як зберігати Офтассіале, краплі очні.

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не застосовувати більше, ніж 60 днів з моменту відкриття контейнера.
- Після використання щільно закривати контейнер, зберігати при кімнатній температурі не вище 30 °C, подалі від джерел тепла.
- Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище.

6. Додаткова інформація.

Склад: натрієва сіль гіалуронової кислоти, α -гліцерилфосфорилхолін, вітамін B12 (ціанокобаламін), вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид), D-пантенол, буферний ізотонічний розчин pH 7,2.

Упаковка. Контейнер 10 мл з дозатором OSD.

Виробник. DMG Italia srl. Via Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.
www.dmgit.com

Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

ВИРОБЛЕНОВ ІТАЛІЇ

