

ТерСо^{Terso}

Краплі очні з осмотичною дією

Без консервантів

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з даною інструкцією.

1. Що таке краплі очні Терсо і для чого їх використовують.

Терсо, краплі очні, є медичним виробом, призначеним для осмотичного способу усунення набряку і початкового набряку рогівки, ад'ювантної терапії симптомів набряку при глаукомі.

Технологія OSD (офтальмологічний дозатор нажимного типу) забезпечує інноваційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів.

2. Що потрібно знати перед використанням медичного виробу Терсо.

Не використовуйте краплі очні Терсо, якщо у вас алергія або у випадку відомої гіперчутливості до будь-якого компоненту медичного виробу (див. розділ 6).

3. Як використовувати Терсо краплі очні.

- Перед використанням медичного виробу слід помити руки.
- Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на день або згідно рекомендацій лікаря.
- Переконайтеся, що крапельниця не контактує з поверхнею ока.

4. Застереження.

- У разі виникнення побічних реакцій слід припинити застосування медичного виробу і звернутися до лікаря.
- Для закапування в очі, не ковтати.
- Перед використанням медичного виробу необхідно переконатися, що контейнер не пошкоджений.
- Не використовуйте цей виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
- Термін придатності вказано щодо запечатаного продукту за умови належного зберігання.

5. Як зберігати краплі очні Терсо.

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не застосовувати більше, ніж 60 днів з моменту відкриття контейнера.

- Після використання щільно закривати контейнер.
- Зберігати при кімнатній температурі не вище +30 °C, подалі від джерел тепла.
- Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище.

6. Додаткова інформація.

Склад: маніт, гліцерин, натрієва сіль гіалуронової кислоти, буферний розчин pH 7,2.

Упаковка. Контейнер 10 мл з дозатором OSD.

Виробник. DMG Italia srl. Via Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.
www.dmgit.com

Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

