

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

ЕМОФІКС  
EMOFIX

Мазь гемостатичний бар'єр



**Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з даною інструкцією**

### **1. Що таке мазь Емофікс і для чого її використовують**

Емофікс це гемостатична мазь, яка функціонує як бар'єр та показана для зупинки та запобігання кровотечам, спричиненим пошкодженням шкірних покривів та кровотечам зі слизових оболонок, таких як, наприклад, невеликі носові кровотечі, в тому числі травматичного походження, невеликі рани на шкірі тощо.

### **2. Що потрібно знати перед застосуванням медичного виробу Емофікс**

Не використовувати медичний виріб у разі відомої гіперчутливості до будь-якого компонента медичного виробу (див. розд. 6);

### **3. Застосування медичного виробу Емофікс**

**Зупинка кровотечі:** нанести достатню кількість мазі на поверхню у зоні кровотечі.

**Профілактика рецидиву носової кровотечі:** застосовувати медичний виріб двічі на день щонайменше протягом двох тижнів після гострого епізоду або за рекомендацією лікаря.

У разі нанесення на слизову оболонку носа рекомендовано використовувати наконечник-аплікатор, що міститься в упаковці.

Після кожного застосування слід ретельно очистити наконечник. Наконечник індивідуального застосування.

### **4. Застереження**

- При виникненні будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування медичного виробу і звернутись до лікаря.

- На початку лікування можливе виникнення відчуття печіння, свербіжу в носі та ринореї, які зазвичай самостійно проходять при продовженні терапії. Якщо зазначені явища не зникають, слід припинити використання засобу та проконсультуватися з лікарем.
- Перед застосуванням пересвідчитися в цілісності упаковки, не використовувати у разі порушення цілісності упаковки. Пошкодження та/або порушення цілісності упаковки може порушити вимоги безпеки самого виробу.
- Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Зазначена дата кінцевого терміну придатності стосується нерозпакованого медичного виробу за умов належного зберігання.

#### **5. Умови зберігання Емофіксу**

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Після використання щільно закрийте тубу.
- Нерозпакований медичний виріб зберігати при температурі не вище 30 °С. У разі дії температур, відмінних від рекомендованих, можливе зміння щільності медичного виробу без погіршення якості. Достатньо зберігати Емофікс при кімнатній температурі, аби він знову набув початкової консистенції.

#### **6. Додаткова інформація**

Склад: суміш насичених жирних кислот, білковий екстракт дріжджів, фосфатидилхолін, токоферил ацетат, віск бджолиний, олія соєва, спирт стеариловий, кальцію хлорид, калію хлорид, магнію хлорид, гліцерол моностеарат, метил- та пропілпарагідроксибензоат, бутилгідрокситолуол (ВНТ).


#### **Вміст упаковки**

Туба 30 г з аплікатором.

**Дата останнього перегляду:** 18.12.2020.

#### **Уповноважений представник.**

ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

 **Виробник.** DMG Italia srl. Via Лаурентіна, км 26,700. 00071, Помеція, Рим, Італія. [www.dmgit.com](http://www.dmgit.com)