

УмаСтар^{Umastar}

Краплі очні

Попереочно зшита натрієва сіль гіалуронової кислоти
з карбоксиметил β -глюканом

Без консервантів

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з даною інструкцією.

1. Що таке Умастар, краплі очні і для чого вони використовуються.

Умастар, краплі очні – це замітник сліз, що не містить консервантів.

Містить попереочно зшиту натрієву сіль гіалуронової кислоти з карбоксиметил β -глюканом.

Умастар, краплі очні, використовуються для захисту, гідратації і змащення поверхні ока.

Попереочно зшита натрієва сіль гіалуронової кислоти завдяки своїй сіткоподібній структурі, забезпечує кращу гідратацію і в'язкість, еластичність та високу стабільність слізної плівки, що залишається протягом тривалого часу на поверхні ока.

Карбоксиметил β -глюкан додатково підсилює зволожувальні властивості цього медичного виробу, дозволяє протидіяти оксидативному стресу, спричиненому вільними радикалами і підтримує реорганізацію клітин рогівки.

Технологія OSD (офтальмологічний дозатор нажимного типу) забезпечує інноваційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів.

Умастар, краплі очні, сприяють усуненню симптомів сухості, відчуття чужорідного тіла тощо при:

- Синдромі сухого ока.
- Механічному стресі: використання контактних лінз, хірургічні процедури тощо.
- Системних захворюваннях: синдром Шегрена, ревматоїдний артрит, захворювання печінки тощо.
- Гормональних порушеннях: менопауза, гормональна терапія тощо.
- Екологічному стресі: кондиціонування повітря, сигаретний дим, вітер тощо.
- Втомлюваності очей: перевантаження органу зору при перегляді відеоматеріалів.
- Застосуванні певних препаратів: антидепресантів, бета-блокаторів, простагландинів тощо.

Медичний виріб сумісний з контактними лінзами.

2. Що потрібно знати, перед використанням Умастар, крапель очних.

Не використовуйте краплі очні Умастар, якщо у вас алергія або відома гіперчутливість до будь-якого компонента медичного виробу (перераховані в розділі «Склад»).

3. Як застосовувати Умастар, краплі очні.

- Не потрібно виймати контактні лінзи перед використанням крапель очних Умастар.
- Вимити руки перед застосуванням продукту.
- Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на день або згідно рекомендацій лікаря.
- Переконайтеся, що крапельниця не контактує з оком.

4. Застереження.

- У разі виникнення побічної реакції припиніть прийом і зверніться до лікаря.
- Для закапування в очі, не ковтати.
- Перед використанням медичного виробу необхідно переконайтеся, що контейнер не пошкоджений.
- Не використовуйте цей виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Термін придатності вказано щодо запечатаного продукту за умови належного зберігання.

5. Як зберігати краплі очні Умастар.

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не застосовувати більше, ніж 90 днів з моменту відкриття контейнера.
- Після використання щільно закривати контейнер. Зберігати при кімнатній температурі не вище +30 °C, подалі від джерел тепла.

6. Додаткова інформація.

Склад: поперечно зшитий полімер Натрієвої солі гіалуронової кислоти 0,15 %, Карбоксиметил β-глюкан 0,3 %, буферний ізотонічний розчин рН 7,2.

Упаковка: контейнер 10 мл з дозатором OSD.

Виробник. Italdevice srl. Via Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.

www.italdevice.com

Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

